

CALIBRA EXPRESS®



Indicações:

Calibra Express é um revestimento ultrafino à base de fosfatos sem grafite, para qualquer tipo de ligas para coroas e pontes na técnica de aquecimento rápido e normal. Utilizado também para cerâmica prensada.

Sua composição garante menor expansão do material, resultando em uma cópia fiel da peça fundida e menos tempo gasto com acabamento e polimento.

Composição:

- **Calibra Express**
Quartzo, Fosfato de Amônia e Óxido de Magnésio.
- **Líquido Expansor**
Dióxido de Silício em partículas coloidais.

Embalagens:

- **Calibra Express**
Sachês de 90g.
- **Líquido Expansor**
Fracos com 250ml e 1000ml.

Diferenciais competitivos:

Utiliza menos líquido para a mistura

Calibra Express deve ser utilizado sempre com o seu líquido especial de mistura Expansor, puro ou diluído. Ao contrário de seus concorrentes, Calibra Express requer menos líquido para a mistura. Isto reflete na adaptação da peça, uma vez que o uso de menos líquido significa menor alteração dimensional. Sendo assim, em longo prazo, você obtém economia sem abrir mão da qualidade de seu trabalho.

Maior Fluidez

Calibra Express apresenta maior fluidez, ocasionando maior facilidade de manuseio.

Resultado em menor tempo de trabalho


Calibra Express apresenta homogeneização mais fácil e rápida, de 6 a 7 minutos desde o momento em que o pó e o líquido entram em contato. Obtendo a cura mais rápida, moldes e equipamentos usados na preparação do material também são liberados mais rapidamente.

Vai direto ao forno

Moldes feitos com Calibra Express podem ir direto ao forno, eliminando a espera de presa adequada. Você pode produzir mais em menos tempo, o que aumenta a sua produtividade.

Produto Isento de Registro na ANVISA, Conforme RDC 260 de 23/09/02.

Gráfico alteração dimensional revestimentos: CALIBRA X HS

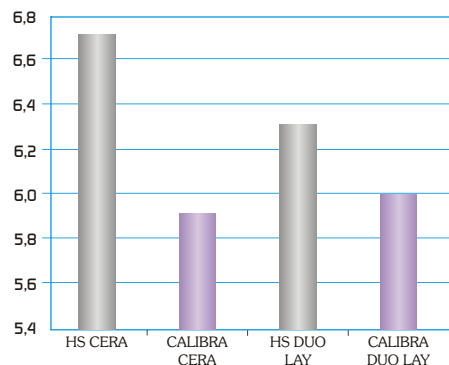

Padrão 5mm (medida do troquel metálico com o anel com rosca). Todas as medidas estão em mm.

Protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA, ESPANHA
Tel.: (00 34) 972 52 61 69 - Fax.: (00 34) 972 52 55 86
protechno@protechno.es - www.protechno.es

Importador e Distribuidor

VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Ltda.
Rua Carlos Tassoni, 4521 - Distrito Industrial - Caixa Postal 48 - CEP 13.633-418 - Pirassununga - São Paulo - Brasil
Fone: +55 (19) 3565-5656 - Fax: +55 (19) 3565-5650 - SAC: 0800-0157700 - sac@vipi.com.br - www.vipi.com.br
C.N.P.J.(MF) 49.425.259/0001-73 - Insc. Est. 536.012.208.119 - Indústria Brasileira



Empresa Certificada
ISO 13485:2003 / ISO 9001:2000